



## EA-50

产品编号：5033

EA-50 是一种胞浆复染液，用于临床细胞学的巴氏染色法。在巴氏染色中，伊红和亮绿（EA）替代 OG 与非致密胞浆物质的结合，但不能替代与亚显微结构中的物质如角蛋白的结合。

用于巴氏染色。

### 规格

本产品包装规格为 100ml,500ml

### 运输、储存和有效期

常温运输，室温避光保存，有效期 12 个月。

### 巴氏染色法

1. 95%乙醇固定 15 分钟。
2. 自来水润洗。
3. Gill's 苏木精染液，1~4 分钟（不同的苏木精染液所用时间不同）。
4. 用自来水润洗。
5. 95%乙醇，浸入 10 次。
6. OG-6 染色 1.5 分钟。
7. 95%乙醇，浸入 10 次。
8. EA-50 染色 2.5 分钟。
9. 两次 95%乙醇，每次浸入 10 次。
10. 无水乙醇 1 分钟。
11. 换两次二甲苯，每次 2 分钟。
12. 封片。